

NEW BRAND

ESENTA™

長らく皆様にご愛顧いただきました
「ニルタック™ (粘着剥離剤)」と「シレッセ™ (皮膚被膜剤)」が
装いも新たに「ESENTA (エセンタ)™」ブランドとして生まれ変わりました。

エセンタ™
皮膚被膜剤
(旧シレッセ™皮膚被膜剤)

ひまく

はがす

エセンタ™
粘着剥離剤
(旧ニルタック™粘着剥離剤)



ここが生まれ
変わりました

あらゆる角度から
スプレーできる

環境に配慮した
成分*を使用

お出かけしたくなる
スタイリッシュなデザイン

* 地球温暖化への影響を低減するために、製品成分を噴射するガスの成分を変更しました。

エセンタ™ 皮膚被膜剤

(旧シレッセ™皮膚被膜剤)

ノンアルコール・シリコーンベース。
排泄物や粘着剤によるダメージから
皮膚を保護します。

高機能シリコーンベースで、薄い被膜を形成し、
剥離刺激などのダメージから皮膚を保護します。
皮膚のデリケートな方におすすめです




- 主にストーマ装具貼付前に、ストーマ周囲など皮膚を保護したい部位に使用
- ノンアルコール
- シリコーン素材
- 速乾タイプ
- どの角度からもスプレー可能

エセンタ™ 皮膚被膜剤 スプレーの使い方




本品のふたを取り、上下によく振ってください

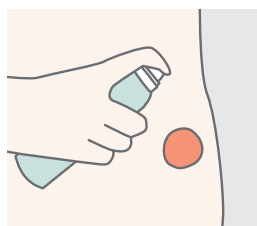

ストーマ周囲など皮膚を保護したい部位に噴霧してください

エセンタ™ 皮膚被膜剤 ワイプの使い方

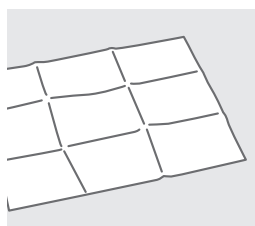

個包装を開封し、シートを広げてください



ストーマ周囲など皮膚を保護したい部位を拭いてください

注意

傷、湿疹等異常がある皮膚、粘膜など、繊細で敏感な部位（眼、口、耳、鼻、膣など）には使用しないでください。
アレルギー反応の懸念がある場合は、使用前にパッチテストを行ってください。
本品の使用により皮膚に炎症等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、早めに医師の診察を受けてください。

エセンタ™ 粘着剥離剤

(旧ニルタック™粘着剥離剤)

剥がしやすく、肌にやさしい。
どの角度からもスプレー可能。
快適で安心のスマートライフを。




ストーマ装具を剥がす際に使用、
100%シリコン成分。
ストーマ装具が簡単に剥がせます。



- 主にストーマ装具、医療用テープの剥離に使用
- ノンアルコール・ノンオイル
- シリコン素材
- 無臭、速乾タイプ
- どの角度からもスプレー可能

エセンタ™ 粘着剥離剤 スプレーの使い方

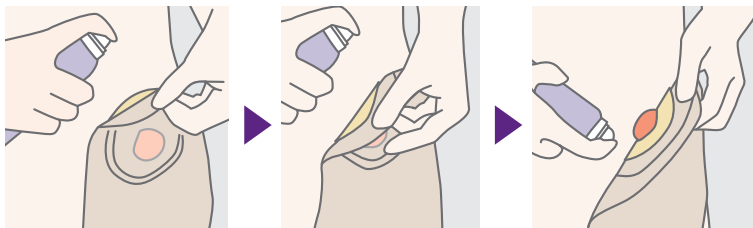


本品を粘着剤の周辺部に噴霧後、数秒間お待ちください。

粘着剤を皮膚からゆっくりと剥がしてください。

剥がれにくい場合、必要に応じて本品をさらに噴霧してください。

エセンタ™ 粘着剥離剤 ワイプの使い方

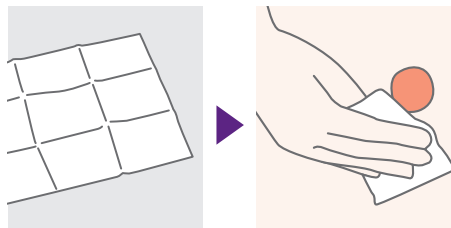

シートを広げ、速やかに、皮膚に残った粘着剤をシートでやさしく拭き取ります。その後、ストーマ周囲の皮膚を石鹸とぬるま湯で清潔にしてください。

注意

傷、湿疹等異常がある皮膚、粘膜など、繊細で敏感な部位（眼、口、耳、鼻、膣など）には使用しないでください。
アレルギー反応の懸念がある場合は、使用前にパッチテストを行ってください。
本品の使用により皮膚に炎症等が生じた場合は、直ちに使用を中止し、早めに医師の診察を受けてください。

エセンタ™皮膚被膜剤



スプレータイプ

注文番号	規格	入数	本体価格(税込み)
423288	50mL	1本	2,178円



ワイプタイプ

注文番号	入数	本体価格(税込み)
423282	30枚	3,564円

エセンタ™粘着剥離剤



スプレータイプ

注文番号	規格	入数	本体価格(税込み)
423289	50mL	1本	2,640円



ワイプタイプ

注文番号	入数	本体価格(税込み)
423281	30枚	3,564円



convatec

—よりそい、つなぐ—

コンバテック ジャパン株式会社

お客様相談窓口

☎ 0120-532384

<https://www.convatec.com/ja-jp/>